

2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette INCP-402
Szybki test do wykrywania przeciwciał IgG i IgM przeciwko 2019-CoV
w próbkach ludzkiej krwi, surowicy i osoczu.
 Skrócona instrukcja

Choroba COVID-19 objawowa i bezobjawowa, pozostawia ślad w postaci wytworzenia przeciwciał, w pierwszej fazie walki z chorobą - klasy IgM, po przechorowaniu - IgG, które można wykryć w krwi, surowicy lub osoczu.

Pobranie próbki

Testu 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette można użyć dla próbki krwi pełnej (pobranej z żyły jak i z palca), surowicy i osocza.

Pobranie krwi z palca:


- Umyj rękę pacjenta ciepłą wodą z mydłem lub przetrzyj wacikiem nasączonym alkoholem. Pozwól skórze wyschnąć.
- Masuj dłoń bez dotykania miejsca nakłucia, pocierając dłoń w kierunku opuszka palca środkowego lub serdecznego.
- Nakłuj skórę sterylnym lancetem. Zetrzyj pierwszą kroplę krwi.
- Delikatnie pocieraj dłoń w kierunku od nadgarstka do dłoni i palca, aby uzyskać pełną kroplę krwi do badania.
- Trzymaj zakraplacz w pozycji pionowej, pobierz próbkę krwi około 1cm powyżej linii znacznika.

Wykonanie testu

Z próbki pełnej krwi pobranej z palca


Przenieś 1 pełną kroplę próbki krwi (około 20 μ l) z zakraplacza do studzienki testu (S), dodaj 2 krople buforu (ok.80 μ l) i uruchom minutnik.

Uwaga: nie należy używać buforu po upływie 6 miesięcy od pierwszego otwarcia.

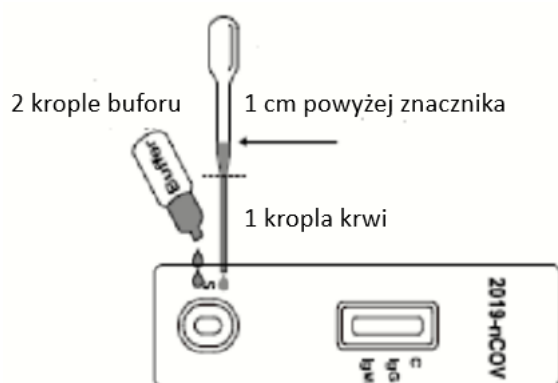

Odczyt testu

Poczekaj do momentu pojawienia się kolorowych linii. Odczytaj wynik po 10 minutach (od momentu naniesienia próbki). Nie należy interpretować wyników po upływie 20 minut.

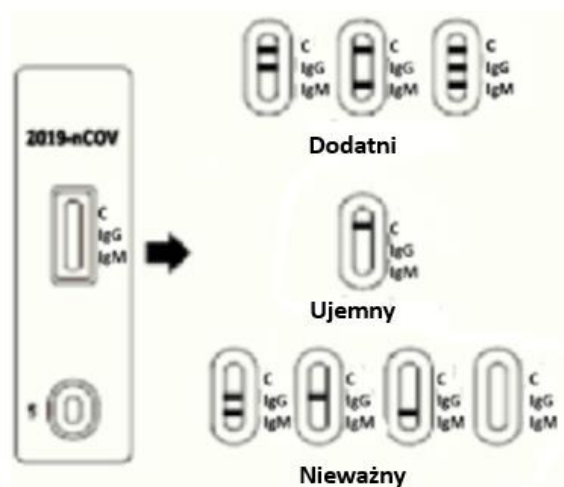

IgG DODATNI: Dwie kolorowe linie testowe. Jedna linia pojawia w rejonie kontrolnym (C), a druga w rejonie testowym IgG.

IgM DODATNI: Dwie kolorowe linie testowe. Jedna linia pojawia w rejonie kontrolnym (C), a druga w rejonie testowym IgM.

IgG i IgM DODATNIE: Trzy kolorowe linie testowe. Jedna linia pojawia w rejonie kontrolnym (C), dwie w rejonach testowych IgG i IgM.

UJEMNY: Jedna kolorowa linia pojawia się w rejonie kontrolnym (C), brak linii w rejonie testowym IgG/IgM.

NIEWAŻNY: brak linii kontrolnej - wskazuje na niedostateczną objętość próbki, błąd wykonania testu, nieprawidłowe działanie odczynników. Należy powtórzyć badanie z użyciem nowego testu.

Charakterystyka testu

Czułość:	
IgM	85,00%
IgG	100,00%
Specyficzność:	
IgM	96,00%
IgG	98,00%
Dokładność:	
IgM	92,00%
IgG	98,60%

Szczegóły dotyczące zakresu braku reakcji krzyżowych i interferencji dostępne w instrukcji testu.